




Algoplaque

Film-Thin

PENSO HIDROCOLOIDE ESTÉRIL EXTRAFINO

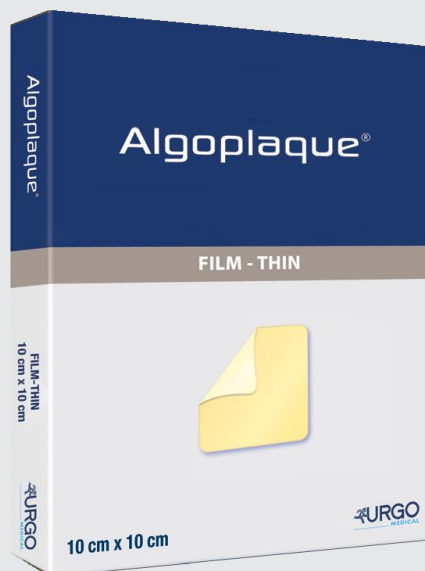

CE 0459

Para o tratamento local de feridas pouco exsudativas

- Extrafino: Permite observar o estado da lesão a cada instante
- Cicatrização em ambiente húmido
- Impermeável à água e às bactérias e é altamente flexível
- Translúcido para observar a evolução da ferida



Algoplaque

Film-Thin

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

Tamanho	U/C	Referência URGO
10x10 cm	16	502832
15x15 cm	5	505753
15x15 cm	10	505839
20x20 cm	5	505285



Algoplaque

Film-Thin

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

Apósito hidrocolóide estéril extrafino.

- **Algoplaque® Film** consta de uma massa hidrocolóide aplicada sobre um suporte protetor.
- A massa, com uma espessura de 350 µm, é composta por partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose) inseridas numa rede de elastómeros.
- A camada externa é um suporte semi-permeável, impermeável à água e às bactérias.

APRESENTAÇÃO:

Acondicionamento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Rádio esterilização.

PROPRIEDADES

- **Algoplaque® Film** forma em contato com a ferida um gel húmido que favorece o processo de cicatrização.
- **Algoplaque® Film** é translúcido, o que permite observar a evolução da ferida.
- A grande flexibilidade e adaptação de **Algoplaque® Film** permitem cobrir todas as zonas corporais.
- Os apósitos da gama **Algoplaque® Film** são permeáveis ao ar e impermeáveis à água e às bactérias. Estas propriedades permitem tomar banhos e duchas, garantem a proteção da ferida face a contaminações exteriores e permitem os intercâmbios gasosos, que favorecem a drenagem dos exsudados.
- Estéril

INDICAÇÕES

Feridas superficiais:

- Aplicações locais nas úlceras de perna e nas úlceras por pressão (U.P.P.) durante a formação de novo tecido (epidermização).
- Prevenção da U.P.P.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não utilizar em caso de infeção.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO:

1. Preparação da ferida:

- Limpar a ferida segundo as técnicas habituais.
- Secar cuidadosamente todo o seu perímetro com uma compressa estéril.

2. Aplicação do apósito:

- Escolher o formato de **Algoplaque® Film** que permita cobrir entre 2 e 3 cm de pele sã à volta da ferida.
- Retirar a película de proteção e colocar **Algoplaque® Film** sobre a ferida, evitando tocar a face adesiva com os dedos.
- Alisar suavemente o apósito sobre a ferida e mais firmemente na periferia.

3. Remoção do apósito:

- A frequência de remoção de **Algoplaque® Film** depende do tipo de ferida, e pelo seu estado.
- No enquadramento de feridas superficiais com pouco exsudado, o apósito deve ser substituído entre 4 a 6 dias.
- No momento de retirar o apósito, a ferida pode estar coberta por uma camada gelatinosa que se elimina facilmente e sem dor mediante um simples enxaguamento.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:

- O uso de **Algoplaque® Film** sobre ulcerações de origem venosa não isenta a realização de tratamento compressivo eventualmente recomendado.
- O uso de **Algoplaque® Film** sobre uma U.P.P. não isenta continuar com o cuidado habitual.
- Não utilizar em caso de deterioração do invólucro estéril.
- Suspender o uso de **Algoplaque® Film** em caso de infeção.
- Período de conservação: 3 anos.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe IIa.
- Marcado CE.
- Isento de látex.