



UrgoSorb Silver

**PENSO ABSORVENTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E
PARTÍCULAS DE HIDROCOLÓIDE**



Urgosorb Silver
Tira

CE 0086  ESTÉRIL

Para o tratamento e desbridamento de feridas com exsudado e/ou cavidades em risco de infecção

- Eficácia antibacteriana sobre um amplo espectro de bactérias
- Alta capacidade de desbridamento e absorção de exsudado
- Cicatrização em meio húmido
- Capacidade hemostática



UrgoSorb

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

Tamanho	U/C	Referência URGO
10x10 cm	10	503134
10x20 cm	5	503136
Tira 2,5x30 cm	5	503009



UrgoSorb Silver

DESCRIÇÃO

- Apósito absorvente antibacteriano de alginato de cálcio.

COMPOSIÇÃO:

Urgosorb® Prata é um apósito composto por fibras alginato de cálcio derivadas de alga marinhas, com ácido manurónico e ácido gulurónico, partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose) e um complexo de prata iónica e naturais.

APRESENTAÇÃO:

Acondicionamento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Rádio esterilização.

PROPRIEDADES

- Os iões de prata produzem um efeito antibacteriano sobre a maioria dos microrganismos envolvidos nas infeções secundárias gram-positivos (MRSA, Staphylococcus Aureus...), gram-negativos (Pseudomonas Aeruginosa...) e leveduras.
- Em contato com feridas exsudadas, **Urgosorb® Prata** gelifica e produz uma limpeza mais rápida.
- **Urgosorb® Prata** absorve os exsudados de feridas altamente exsudadas e mantém um meio húmido que cria condições favoráveis ao processo de cicatrização.
- **Urgosorb® Prata** absorve apenas verticalmente, sem migração lateral do exsudado. A pele perilesional é consequentemente respeitada e protegida de todos os riscos de maceração.
- **Urgosorb® Prata** gelifica, amolecendo e drenando os resíduos necróticos durante a granulação da necrose húmida.
- **Urgosorb® Prata** pode ser facilmente retirado, sem dor e monobloque.
- A elevada adaptabilidade de **Urgosorb® Prata** permite adaptá-lo instantaneamente à superfície da ferida.
- Através da ativação plaquetária, **Urgosorb® Prata** favorece a hemóstase primária de feridas sangrantes agudas e crónicas.

INDICAÇÕES

- **Urgosorb® Prata** está indicado no tratamento local de feridas exsudativas e sangrentas, com gangrenas e em estado de granulação e com risco de infeção.
- **Urgosorb® Prata Tiras** está indicado no tratamento local de feridas cavitárias em risco de infeção.
- **Urgosorb® Prata** está contraindicado na área endonasal em cirurgia de rinosinusite, implantes cirúrgicos, controlo de sangramento significativo e em pacientes com sensibilidade conhecida aos alginatos ou à prata.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO

- Limpar a ferida com soro fisiológico. Secar cuidadosamente o contorno da pele usando uma compressa estéril.
- Se previamente usar um antisséptico, enxaguar a ferida com soro fisiológico antes de aplicar **Urgosorb® Prata**.
- Escolher o tamanho adequado de **Urgosorb® Prata** mantendo pelo menos 1 ou 2 cm do apósito a cobrir a pele sã que rodeia a ferida.
- Aplicar **Urgosorb® Prata** diretamente sobre a ferida.
- Em feridas profundas ou cavitadas (úlceras irregulares, sinus pilonidal), aplicar **Urgosorb® Prata Tiras** sem exercer excessiva pressão.
- Cobrir **Urgosorb® Prata** com um apósito secundário: duas camadas de compressas e uma ligadura ligeiramente apertada ou adesivo.
- **Urgosorb® Prata** deve ser substituído entre 1 a 3 dias, dependendo das condições da ferida.
- Em caso de úlcera de perna, **Urgosorb® Prata** pode ser humedecido com soro fisiológico com o objetivo de facilitar a sua remoção.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:

- O tratamento com **Urgosorb® Prata** deve ser conduzido sob supervisão médica.
- Não se recomenda o seu uso concomitantemente com outros tratamentos locais.
- Na ausência de informação clínica específica, está contraindicado o seu uso em mulheres grávidas ou em período de aleitamento, recém-nascidos e neonatos.
- Evitar o contato com eléctrodos ou géis condutores durante medições electrónicas (EEG, ECG).
- Não usar em pacientes submetidos a exames de Ressonância Magnética.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado como compressa cirúrgica para implantar, ao não ser absorvível.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado nem em necroses secas nem em feridas ligeiramente exsudativas.
- A eficácia de **Urgosorb® Prata** pode ver-se comprometida pelo uso excessivo de pomadas de vaselina.
- **Urgosorb® Prata** deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade.
- Não usar se o protetor de esterilidade estiver danificado.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe III.
- Marcado CE.
- Isento de látex.