

UrgoSorb

PENSO ABSORVENTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E PARTÍCULAS DE HIDROCOLÓIDE



CE 0459  ESTERIL

Para o tratamento de feridas com moderado ou muito exsudado

- Absorve o exsudado
- Desbrida e cicatriza feridas com muito exsudado
- Pode ser removido de forma monobloque
- Propriedades hemostáticas



UrgoSorb

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

Tamanho	U/C	Referência URGO
10x10 cm	16	508223
10x20 cm	16	501670

UrgoSorb

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

UrgoSorb® é um apósito estéril absorvente composto por fibras de Alginato de cálcio e derivadas de alga marinha, com ácido manurónico e ácido gulurónico, e partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose), polímeros de origem natural conhecidos pelo seu elevado poder de absorção e de gelificação em meio húmido.

APRESENTAÇÃO:

UrgoSorb® apresenta-se em forma de compressa em envelopes individuais estéreis prontos a usar.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Rádio esterilização.

PROPRIEDADES

COMPOSIÇÃO:

- **UrgoSorb®** é um apósito que acelera o desbridamento por gelificação dos seus componentes ao entrar em contato com os exsudados da lesão. (Estudo STEPS).
- **UrgoSorb®** demonstrou uma redução da superfície da ferida a desbridar 3 vezes mais rápida que o apósito hidrocolóide de referência (STEPS).
- **UrgoSorb®** absorve os exsudados das lesões altamente exsudativas e mantém um ambiente húmido que favorece a cicatrização.
- **UrgoSorb®** absorve verticalmente, sem migração lateral do exsudado. Desta forma respeitam-se os contornos da lesão, evitando o risco de maceração.
- O gel **UrgoSorb®** amacia e drena os detritos necróticos na fase de desbridamento da necrose húmida.
- **UrgoSorb®** retira-se facilmente, sem dor e com um só gesto.

HEMOSTASIA:

- **UrgoSorb®** por activação plaquetária, é um apósito que favorece a hemostasia primária das lesões agudas e crónicas que apresentam sangramento.

INDICAÇÕES

CICATRIZAÇÃO:

- **UrgoSorb®** é um apósito adequado para tratamento local das lesões com exsudação moderada ou elevada, em particular de úlceras por pressão de decúbito, feridas cirúrgicas e feridas profundas.
- **UrgoSorb®** pode utilizar-se em lesões que apresentam sinais clínicos de infecção sempre que se associe a um tratamento médico adaptado.

HEMOSTASIA:

- **UrgoSorb®** favorece a hemostasia primária das feridas agudas e crónicas.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO:

1. Preparação da lesão:

- Limpar a lesão segundo as técnicas habituais. Secar cuidadosamente o contorno da lesão com uma compressa estéril.

2. Colocação de UrgoSorb® compressa:

- Escolher o formato de **UrgoSorb®** que cubra a ferida entre 1 cm e 2 cm de pele perilesional sã.
- Em caso de úlceras nas extremidades inferiores, pode humedecer-se a compressa com uma solução de soro fisiológico antes de aplicar.
- A grande flexibilidade de **UrgoSorb®** permite-lhe adaptar-se imediatamente à superfície da lesão. Cobrir **UrgoSorb®** com um apósito secundário: dupla espessura de compressas e ligadura não muito apertada ou adesivo.

3. Revisão e substituição do apósito:

- **UrgoSorb® compressa** será substituído quando alcance o estado de saturação, ou seja, quando o exsudado trespasse e apareça no apósito secundário. A frequência de renovação dependerá do nível de exsudação da lesão: diariamente, em caso de lesões com abundante exsudado e cobertas de restos fibrino-necróticos ou infectadas, de dois em dois dias, em caso de lesões limpas com exsudado moderado.
- Retirar o apósito secundário. A integridade do apósito e do gel permitem uma fácil remoção de **UrgoSorb®**, com um só gesto e sem fragmentação.
- Em úlceras da perna, pode humedecer-se **UrgoSorb®** com soro fisiológico para facilitar a sua remoção.
- Pode ser recortado

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:

- Ao não ser reabsorvido, **UrgoSorb®** não se deve utilizar como compressa cirúrgica implantável.
- **UrgoSorb®** não se deve utilizar durante a fase necrótica seca, sobre feridas pouco exsudativas, nem sobre queimaduras de 3º grau.
- Uma vez limpa a lesão e menos exsudado, prosseguir o tratamento local com **Algoplaque®**.
- Não utilizar em caso de deterioração do protetor estéril.
- **Período de conservação:** 3 anos.

ESTATUTO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe II b.
- Mercado CE.
- Isento de látex.